


**AGRAFES
DE VARISATION**


TECHNIQUE
OPÉRATOIRE

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

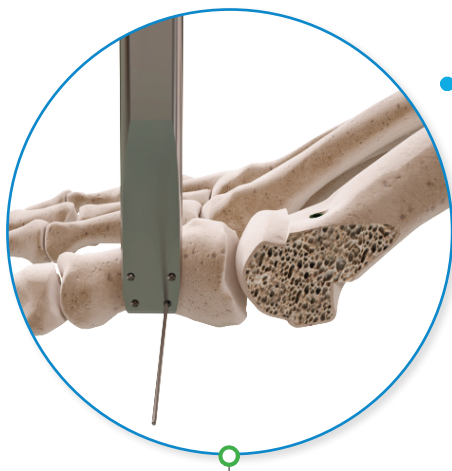


PRÉPARATION OSSEUSE

Si l'os est de forte densité, percer l'entraxe à l'aide de la broche Ø 1.0 L 80 mm du guide de perçage intégré à l'impacteur.

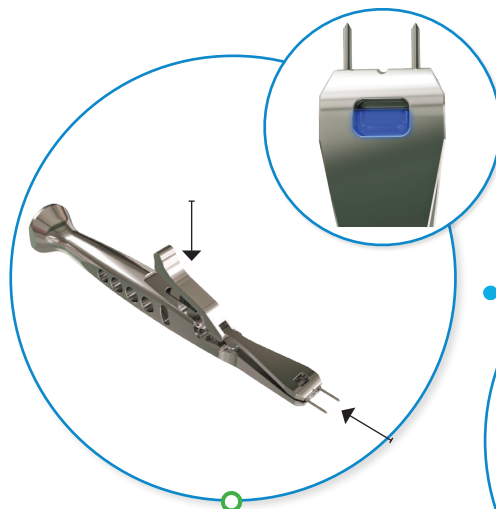


PRÉPARATION DE L'IMPLANT

Monter l'agrafe sur le porte-agrafe impacteur de manière à mettre en contact le dos de l'agrafe avec la butée. Verrouiller en fermant la gâchette.

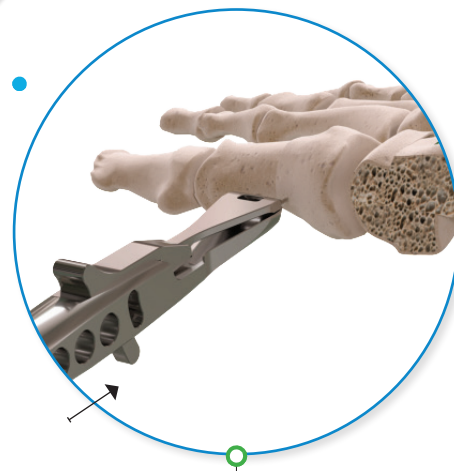

MISE EN PLACE

Impacter directement l'agrafe si l'os est de densité faible.

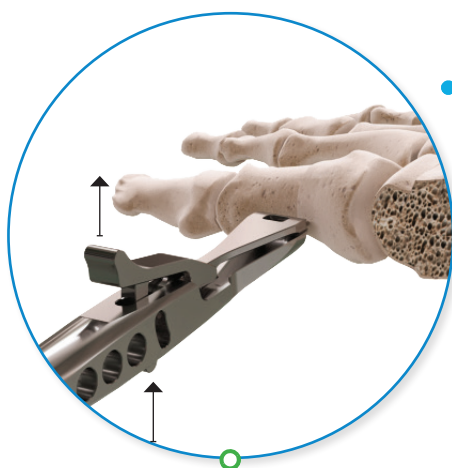

LIBÉRATION DE L'IMPLANT

Libérer l'agrafe en ouvrant la gâchette soit avec le pouce soit avec l'index (poussoir inférieur).



IMPACTION OPTION 1

Tourner le porte-agrafe impacteur de 90° puis finaliser l'impaction avec les encoches du porte-agrafe.



IMPACTION OPTION 2

L'impaction peut être finalisée avec l'impacteur.

RÉFÉRENCES



DROITE 90° STÉRILE

DIMENSIONS

GS1

8 x 8 mm

3663165001724

10 x 10 mm

3663165001731



ANGULÉE 26° STÉRILE

DIMENSIONS

GS1

8 x 8 mm



3663165001700

10 x 10 mm

3663165001717

F.A.S.T.®

Foot & Ankle Surgery Technologies

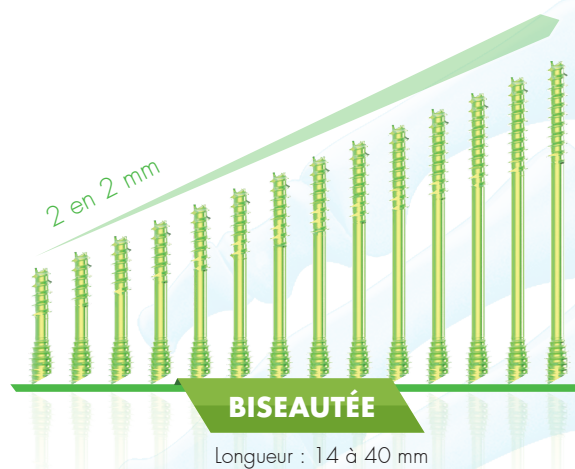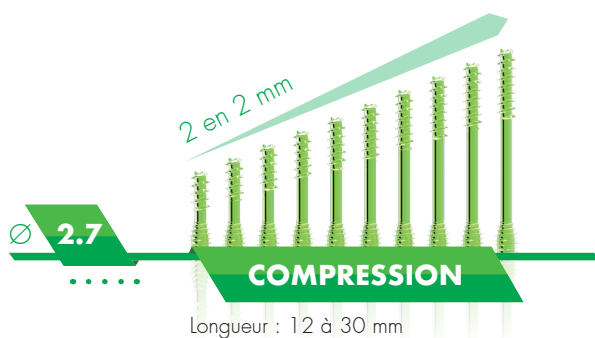


PRODUITS ASSOCIÉS



VIS SÉCABLES Ø 2

ANCILLAIRE

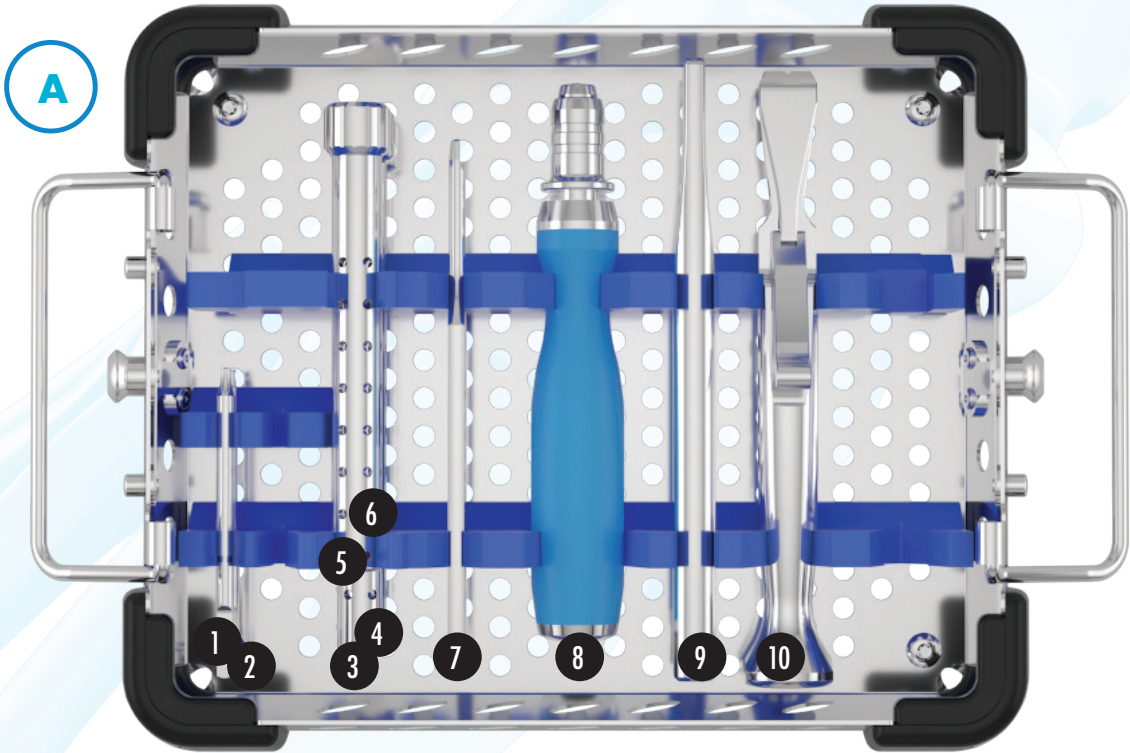

AGRAFES + VIS Ø 2.7

Réf. VASEGAP

DÉSIGNATION

GS1

A	PANIER AGRAFE VEOFIX	3663165004794
1	TOURNEVIS TORX T8	3663165003384
2	COUNTERSINK Ø 2.7	3663165003421
3	TUBE PERFORÉS BR L 120 MM	3663165003711
4	BROCHE Ø 1.2 - L 120 MM	3663165003476
5	TUBE PERFORÉ BR L 100 MM	3663165001915
6	BROCHE Ø 1 - L 80 MM	3663165003469
7	JAUGE BROCHE Ø 1 - L 80 MM / Ø 1.2 - L 120 MM	3663165003513
8	POIGNÉE ENCLIQUETAGE AO	3663165003490
9	IMPACTEUR D'AGRAFE 90°	3663165004763
10	PORTE-AGRAFE IMPACTEUR 90°	3663165004787

OPTIONNEL

(Instruments supplémentaires inclus dans le panier)

TOURNEVIS TORX T7	3663165003377
COUNTERSINK Ø 2.3	3663165003414
TOURNEVIS TORX T10	3663165003391
COUNTERSINK Ø 3.2	3663165003438
PORTE-AGRAFE 26°	3663165004770
DAVIER	3663165000901

Notes

[illegible]



www.serf.fr

serf *extremity*

85 avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu
FRANCE

Tel. **+33** (0)4 72 05 60 26
Fax **+33** (0)4 72 02 19 18
serf.extremity@serf.fr

Distribué par

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu'identifiés spécifiquement comme « non marqués CE ».

Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe IIb et IIa.

Les dispositifs médicaux de classe IIb et IIa sont marqués CE 0459 avec le GMED.

Avant toute utilisation d'un produit SERF, veuillez vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire.

Consulter les étiquettes et notices produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d'emploi.

©2019 SERF. Tous droits réservés. **F.A.S.T.**® est une marque de commerce de SERF.

CE 0459



SERF
85 Avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu - France
Tel. +33 (0)4 72 05 60 10

Distribué par

serf *extremity*